


Parasol®

Visiblemente diferente

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight


Innovación en el tratamiento del Ojo Seco Moderado a Severo

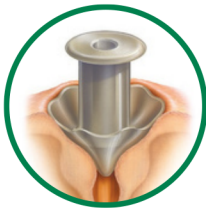

Fácil de insertar – El orificio central de Parasol, facilita su inserción, brindando mayor comodidad para su paciente.



Tamaño simple - Pequeños y medianos, incluso para puntos lagrimales poco comunes X-small y Large.

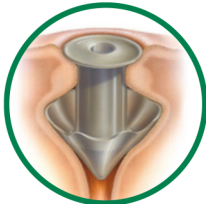

Retención Garantizada - Diseñado para una excelente retención.

Parasol®

Tapones lagrimales permanentes Pre-Cargadas Esterilizadas

ASG medical
Línea Oftalmológica

Parasol®

Visiblemente diferente

Tapones lagrimales precargados

Los ocluidores se empaquetan en una conveniente (1) bandeja de par. Cada ocluidor es individualmente estéril y precargado en un dispositivo de inserción desechable de alta calidad.



CONTRAINDICACIONES

- Lagrimeo secundario a la dacriocistitis crónica con exudaciones mucopurulentas, inflamación del párpado y/o de la epifora.
- El sistema lacrimal debería examinarse mediante irrigación para comprobar la existencia de un bloqueo antes de llevar a cabo la oclusión.

ADVERTENCIAS

- Se debe tener sumo cuidado en el proceso de dilatación del punto lacrimal para evitar la perforación del punto o canaliculo.
- Se han dado casos de molestias por cuerpos extraños, irritación, hinchazón, epifora, dolor granuloma tras la oclusión puntal en algunos pacientes, si esto ocurre examinar o retirar el ocluidor.
- La oclusión lagrimal puede aumentar los efectos de la medicación ocular, por lo tanto, debe reconsiderarse la dosis de tal medicación en los pacientes con ocluidores lagrimales.
- Este dispositivo es de un solo uso.
- No se garantiza la esterilidad del producto si el embalaje está abierto o dañado.
- No reutilice los ocluidores, ya que el reprocesamiento o reutilización puede afectar a la integridad estructural del dispositivo y hacer que este falle, lo que a su vez puede causar un empeoramiento del paciente o usuario.
- La reesterilización puede aumentar el riesgo de contaminación del dispositivo y causar una infección en el paciente.
- La contaminación del dispositivo puede producir lesiones, enfermedades, e incluso el fallecimiento del paciente.

ALMACENAMIENTO

- Guardar a temperatura ambiente.